



Die AQUAdem 40 Sprühpistole wird standardmäßig mit einer Fächerdüse geliefert.

Für einen **zentrierten Strahl** kann die Düse durch das Einlegen einer speziellen Scheibe umgerüstet werden.

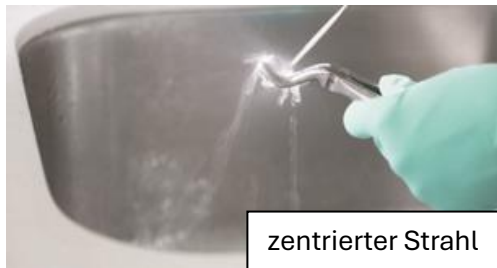


1. Um die Sprühpistole auf einen zentrierten Strahlen umzurüsten, drehen Sie zunächst die schwarze Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu öffnen.

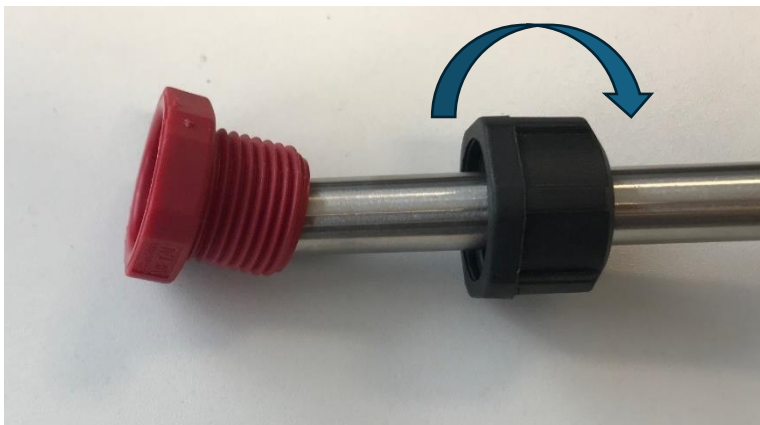

2. Entnehmen Sie den O-Ring, sowie den Düseneinsatz aus dem roten Gehäuse.



3. Setzen Sie nun die mitgelieferte Edelstahlscheibe in das rote Gehäuse und anschließend den O-Ring ein.

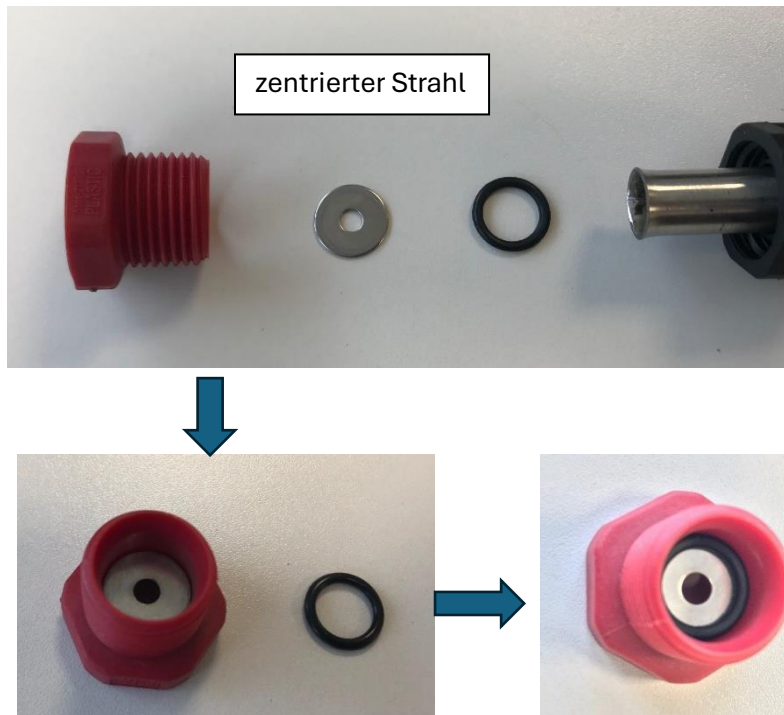


4. Schrauben Sie anschließend das rote Gehäuse wieder mit der schwarzen Überwurfmutter handfest zusammen.

Sollten Sie wieder den Fächerstrahl benötigen, gehen Sie bitte so vor:

5. Führen Sie Schritt 1 + 2 gem. Anleitung durch.
6. Setzen Sie nun zuerst die Düse wie abgebildet in das rote Gehäuse und anschließend den O-Ring ein.




7. Schrauben Sie nun die Düse mit der schwarzen Überwurfmutter wieder handfest an.

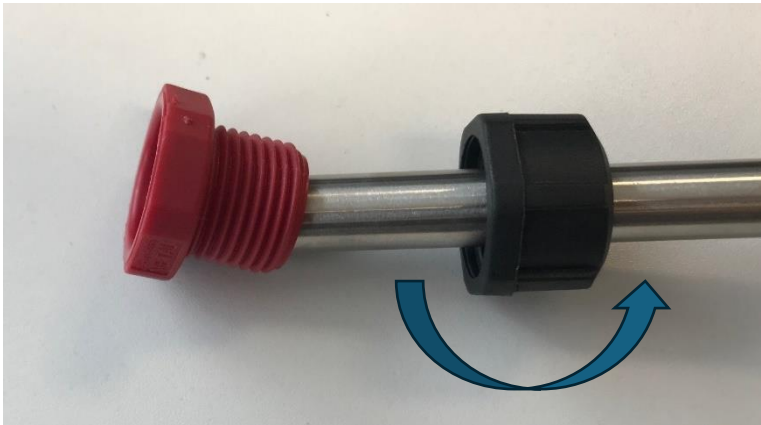

Die neue Düse ist nun einsatzbereit.

Anschlussvariante 1 direkt an AQUAdem 40:

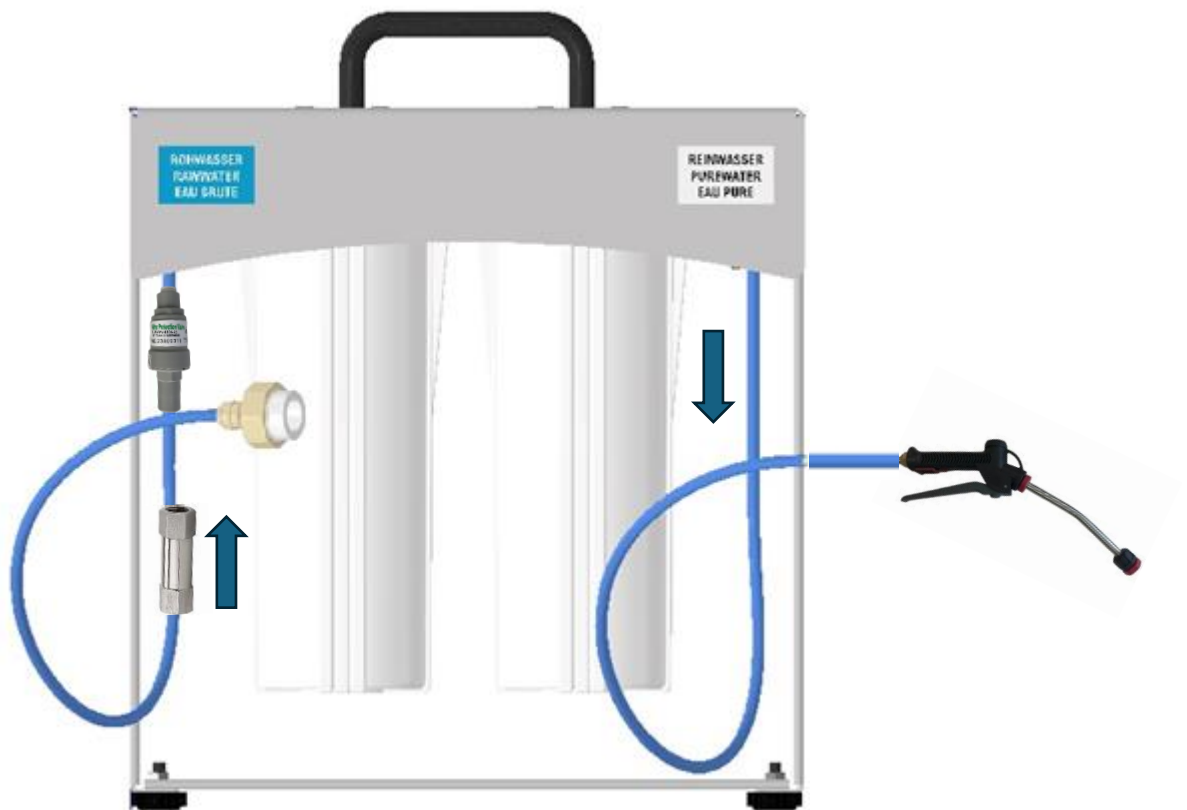

Anschlussvariante 2 mittels T - Stück zwischen AQUAdem 40 und Autoklav:

